

# Vejledning på montering af Ringloc Bi-Polar hoved

## 1. Trin


Læg 28mm hovedet på et fast underlag og tryk polyethylen lineren ned over.

Bemærk! Det er VIGTIGT efterfølgende at sikre at 28mm hovedet kan rotere frit i lineren.




## 2. Trin

Liner med 28mm hoved samles med det STORE metalhoved (skubbes og drejes ind).

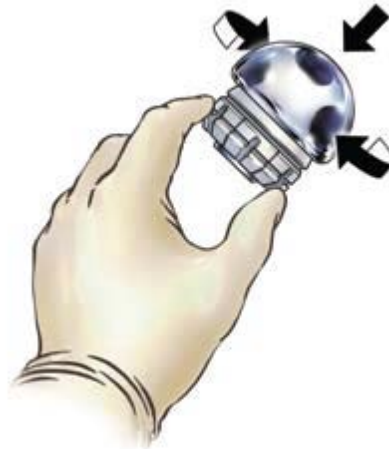

## 3. Trin

Det Bipolære hoved samles med femurprotesen og stødes på plads.

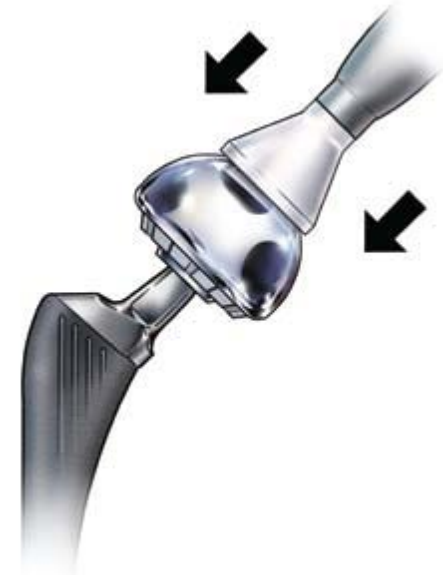

# Vejledning på montering af Ringloc Bi-Polar hoved

## Ringloc Bi-Polar implantater

Varenr.	Beskrivelse
11-165208	RINGLOC BI-POLAR 28X42MM
11-165212	RINGLOC BI-POLAR 28X44MM
11-165216	RINGLOC BI-POLAR 28X46MM
11-165220	RINGLOC BI-POLAR 28X48MM
11-165224	RINGLOC BI-POLAR 28X50MM
11-165228	RINGLOC BI-POLAR 28X52MM
11-165232	RINGLOC BI-POLAR 28X54MM
11-165236	RINGLOC BI-POLAR 28X56MM
11-165240	RINGLOC BI-POLAR 28X58MM
11-165244	RINGLOC BI-POLAR 28X60MM

Varenr.	Beskrivelse
11-165301	RNGLC BI-POLAR REPLC RING 42MM
11-165302	RNGLC BI-POLAR REPLC RING 43/45MM
11-165303	RNGLC BI-POLAR REPLC RING 46/47MM
11-165304	RNGLC BI-POLAR REPLC RING 48/50MM
11-165305	RNGLC BI-POLAR REPLC RING 51/52MM
11-165306	RNGLC BI-POLAR REPLC RING 53/55MM
11-165307	RNGLC BI-POLAR REPLC RING 58/61MM

